


Aandachtspunten

Nota's

Scans _____ / dag

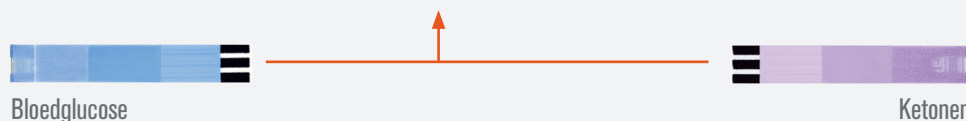

Glucose gaat omlaag

72 mg/dL

Notities toevoegen

- Snelwerkende insuline
- Langwerkende insuline
- Voedsel

Voer langw ins in

1.0 eenheid

Lo = < 40mg/dL*

Hi = > 500mg/dL

*Lo met strip : < 20mg/dL



Assistentie en informatie?
 Gratis nummer: 0800 167 72
www.FreeStyleLibre.be



Bekijk de rapporten

Nota's



Bekijk geschiedenis

- Logboek
- Dagelijkse grafiek
- Gemiddelde glucose

1 / 2

- Dagelijkse trends
- Tijd binnen doelbereik
- Hypo's
- Sensorgebruik

Beschikbare rapporten

Logboek OK

23 Feb 10:23 **126** →

23 Feb 06:37 **97** ↗

22 Feb 23:09 **108** ↘

mg/dL

Dagelijkse grafiek (mg/dL) OK

22 feb
Maandag

Gemiddelde glucose OK

Gemiddelde: **119** mg/dL

Afgelopen 7
dagen

Sensorgebruik OK

Scans per dag **3**

Geregistr. sensorgeg **81%**

Afgelopen 7
dagen

Dagelijkse trends (mg/dL) OK

Afgelopen 7
dagen

Tijd binnen doelbereik OK

Hoger dan **34%**

Binnen doel **54%**

Lager dan **12%**

Doelbereik 80 - 180 mg/dL

Afgelopen 7
dagen

Hypo's OK

Totaal aantal voorvallen: **10**

Afgelopen 7
dagen



Dit product moet worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende plaatselijke regelgeving met betrekking tot de afvoer van elektronische apparatuur, batterijen, scherpe voorwerpen en materialen die mogelijk zijn blootgesteld aan lichaamsvloeistoffen.



Download de FreeStyle Libre software op: www.FreeStyleLibre.be