



0800 167 72 (België)

8002 54 87 (Luxemburg)

AutoAssist Free download :

<http://www.abbottdiabetescare.be/nl/freestyleaaneo>

FreeStyle en gerelateerde merknamen zijn handelsmerken van Abbott Diabetes Care Inc. in verschillende jurisdicties. Andere handelsmerken zijn eigendom van de betreffende eigenaren.

© 2015 Abbott Laboratories Limited. Alle rechten voorbehouden.
Abbott Diabetes Care Belgium Avenue Einstein 14, 1300 Waver België.

ADCFSNEM01FE-11a15N



FreeStyle

Precision Neo

Bloedglucose- en -ketonenmeetsysteem

Uw insulinefuncties

QUICKGUIDE




1 Test uw bloedglucose

Als u een knipperend  ziet, dan zullen uw maaltijd doses verschillen omdat uw bloedglucose buiten het doelbereik ligt



2 Druk UITSLUITEND als u op het punt staat te ontbijten, de lunch of het avondeten te gebruiken

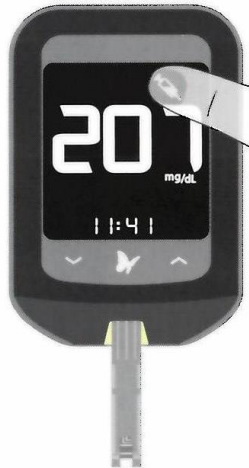


3 Kies de maaltijd dosis voor de maaltijd die u gaat consumeren

ontbijt
Maaltijdinsuline

lunch
Maaltijdinsuline

avondeten
Maaltijdinsuline

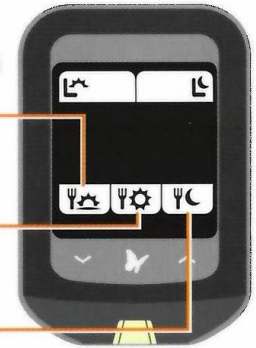

4 Nieuwe **dosis** op uw meter weergegeven

Uw nieuwe dosis bestaat uit insuline voor uw maaltijd en insuline voor uw hoge bloedglucose. In het weergegeven voorbeeld 8 + 2 (dit mag enkel worden gebruikt met snelwerkende insuline)



5 Druk om de dosis in te voeren

betekent dat u de dosis nam

