


# Aandachtspunten

Nota's

Scans \_\_\_\_\_ / dag

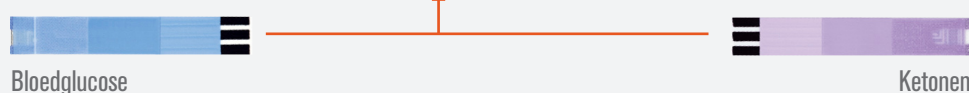

Lo = < 40mg/dL\*      Hi = > 500mg/dL

\*Lo met strip : < 20mg/dL



assistentie en informatie?  
 Gratis nummer: 0800 167 72  
[www.FreeStyleLibre.be](http://www.FreeStyleLibre.be)



# Bekijk de rapporten

Nota's



### Bekijk geschiedenis

- Logboek
- Dagelijkse grafiek
- Gemiddelde glucose

1 / 2

- Dagelijkse trends
- Tijd binnen doelbereik
- Hypo's
- Sensorgebruik

## Beschikbare rapporten

**Logboek** OK

23 Feb 10:23	126 →
23 Feb 06:37	97 ↗
22 Feb 23:09	108 ↘

mg/dL

**Dagelijkse grafiek (mg/dL)** OK

22 feb  
Maandag

**Gemiddelde glucose** OK

Gemiddelde: **119** mg/dL

00:00	121
12:00	151
24:00	134
24:00	69

Afgelopen 7 dagen

**Sensorgebruik** OK

Scans per dag **3**

Geregistr. sensorgeg **81%**

Afgelopen 7 dagen

**Dagelijkse trends (mg/dL)** OK

Afgelopen 7 dagen

**Tijd binnen doelbereik** OK

Hoger dan	34%
Binnen doel	54%
Lager dan	12%

Doelbereik 80 - 180 mg/dL

Afgelopen 7 dagen

**Hypo's** OK

Totaal aantal voorvallen: **10**

00:00	1
12:00	0
24:00	3
24:00	6

Afgelopen 7 dagen



Dit product moet worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende plaatselijke regelgeving met betrekking tot de afvoer van elektronische apparatuur, batterijen, scherpe voorwerpen en materialen die mogelijk zijn blootgesteld aan lichaamsvloeistoffen.



Download de FreeStyle Libre software op: [www.FreeStyleLibre.be](http://www.FreeStyleLibre.be)