



Procedure voor het verwijderen van de applicaties (Windows 7): FreeStyle Auto-Assist en FreeStyle Libre:

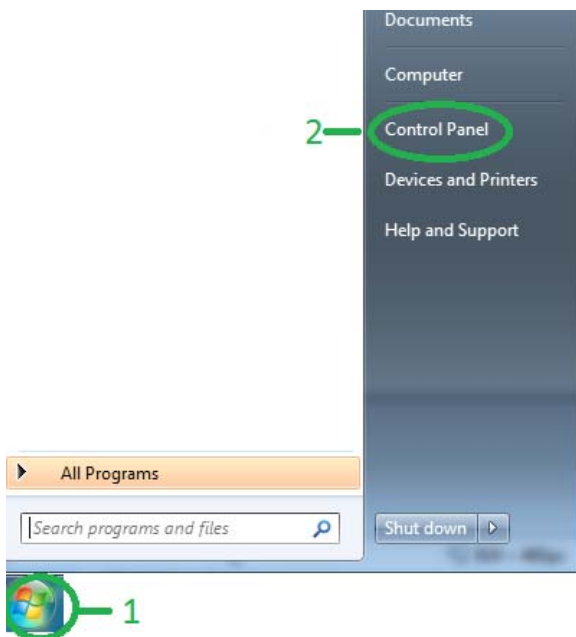

Om een FreeStyle-applicatie te verwijderen, zijn er verschillende mogelijkheden:


- Klik op de volgende link, voor het verwijderen van de FreeStyle Libre-applicatie:
["C:\Program Files \(x86\)\FreeStyle Libre\Uninstall FreeStyleLibre.exe"](C:\Program Files (x86)\FreeStyle Libre\Uninstall FreeStyleLibre.exe)
- of
- Open het Control panel (configuratievenster), voor het verwijderen van andere FreeStyle-applicaties.
Klik op het Windowspictogram **Start** en kies de optie **Control Panel** zoals hiernaast weergegeven:

Eenmaal in het **Control Panel** (zoals in punt 3 hieronder), bewerk de weergave naar **Category** en kies **Uninstall a program** (een programma verwijderen):

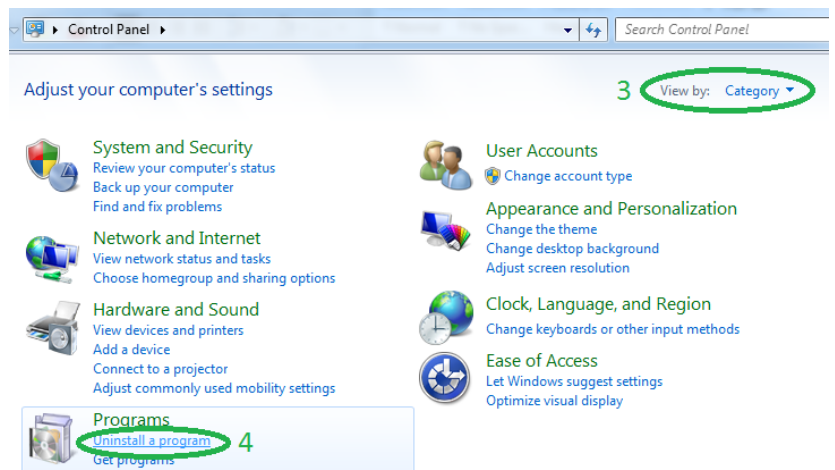

Zodra dit voltooid is, verschijnt er een lijst met geïnstalleerde applicaties:

Selecteer vervolgens de applicatie die u wenst te verwijderen (zoals bij punt 5) en klik op **uninstall** (zoals bij punt 6).

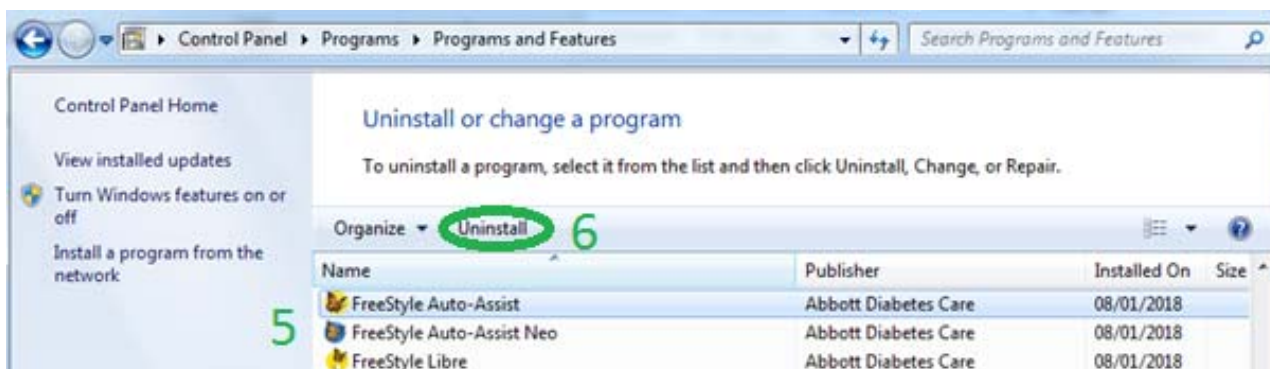



Bevestig door op OK te klikken zodat uw PC kan verdergaan met de verwijdering van de applicatie.

Procedure voor het verwijderen van de applicaties: FreeStyle Auto-Assist en FreeStyle Libre (Windows 10):

U beschikt over Windows 10?

Zo verwijdert u best de Apps: FreeStyle Auto-Assist / FreeStyle Auto-Assist Neo of FreeStyle Libre

- Selecteer in het Startmenu  de optie **Instellingen** .
- Selecteer **Apps**.
- Selecteer het programma **FreeStyle** en selecteer vervolgens **Verwijderen**.
- Volg de instructies op het scherm.